

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 28 від 10-05-2024

Засіб для чищення сухожарових стерилізаторів

490 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Опис товару

- Об'єм: 500 мл
- Склад: Гідроксид натрію 5-15%, розчинники 5%, неіонні ПАР <5%

Універсальний засіб для чищення сухожарових стерилізаторів і делікатного очищення манікюрних інструментів Мікростоп Клін.

Ефективно очищає камеру сухожарового стерилізатора від коричневого нальоту в результаті дії продуктів горіння. А також ефективно, але дбайливо очищає манікюрний інструмент від нальоту, який утворився в результаті впливу високих температур, опадів продуктів горіння, обробки хімічними речовинами і т.д. за винятком виробів з алюмінію, кольорових металів і оцинкованих деталей.

Спосіб застосування для стерилізаторів. Засіб готовий до використання. Ретельно нанести засіб на внутрішню поверхню кришки сухожару, лоток для інструментів, тримачі для крафт-пакетів і стерилізаційну камеру м'якою тканиною або поролоною губкою без абразиву. Температура поверхні не повинна бути вище 60 ° С. Залишити на поверхні на 30 хв. Ретельно очистити сухою серветкою або губкою. Перед процедурою переконатися, що сухожар охолов. Уникати потрапляння речовини на нагрівальний елемент, термоелемент і температурний датчик сухожару.

Спосіб застосування для манікюрних інструментів. Приготувати розчин з води і концентрату в співвідношенні 1: 2, де 1 це частка концентрату, а 2 - частка води. Засіб слід додавати в воду, а не навпаки. Завантажити інструменти в приготований розчин на 5-15 хв. в залежності від ступеня забруднення. Промити під проточною водою. Придатний для використання в УЗ-ванні.

Запобіжні заходи. Використовувати тільки за призначенням! Берегти від дітей. Не змішувати з іншими засобами. Не вдихати пари, не допускати попадання в очі на шкіру і одяг. Після застосування ретельно вимити руки. Всі роботи із засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках і захисній масці.